

# BIOSELF S.A.

## Um alle gespeicherten Daten in Ihrem BIOSELF® zu löschen

Um die gespeicherten Daten in Ihrem BIOSELF® zu löschen gibt es 2 Möglichkeiten:

*Falls der Speicher bereits leer ist, leuchtet « C1-00 » auf. Dies erscheint bei einmaligem kurzem Drücken auf dem schwarzen Knopf.*

1. Wenn Sie den Zyklus 99 Tagen laufen lassen, ohne den roten Knopf zu drücken, werden alle Daten automatisch gelöscht. Achten Sie dabei, dass die Anzeige nicht auf « INT » eingestellt ist.
2. Durch das technische Menü (was im Prinzip unseren Technikern oder Verteilern vorbehalten ist).

**ACHTUNG:** das technische Menü ist mit grösster Vorsicht zu benutzen. Das Menü 8 stellt alle Daten sowie den Tageszähler auf Null zurück. Nur die Kalibrierung bleibt erhalten.

Um ins technische Menü zu gelangen:

- a. Die metallischen Teile der Temperaturprobe (mit drei Fingern) drücken und, in der darauf folgenden Sekunde, den roten Knopf (mit einem kleinen spitzigen Gegenstand) betätigen.
- b. « MT-1 » leuchtet auf.
- c. Durch kurzes Drücken auf dem schwarzen Knopf fortfahren, bis « MT-8 » aufleuchtet.
- d. Dann 3 Sekunden lang auf dem schwarzen Knopf drücken, bis « SurE ? » aufleuchtet.
- e. Um die « Initalisierung » des Apparats zu bestätigen, 3 Sekunden lang auf dem roten Knopf drücken.

Kontrolle der Rückstellung

- f. Dann kurz auf dem schwarzen Knopf drücken: « C1-00 » leuchtet auf.
- g. Verwenden Sie den BIOSELF® ab dem nächsten Morgen, als ob er neu wäre.