



Ihre Nutzungsdauer ist allerdings kürzer, wenn Sie Ihren PERSONA Monitor mehr als ein- oder zweimal pro Tag öffnen.

Wenn die Batterien in Ihrem Monitor schwächer werden, erscheint das  Symbol auf dem Display. Dann sollten die Batterien innerhalb von 4 Wochen* ausgetauscht werden.

** Wir empfehlen Ihnen, Duracell AAA „Long-life“-Alkalibatterien zu kaufen.*

Wenn Sie die Batterien nicht austauschen, nimmt der Monitor nach den 4 Wochen keine Tests mehr an, d.h. Sie können PERSONA nicht verwenden. Dann wird  angezeigt.

Nehmen Sie die Batterien nie länger als zwei Stunden aus dem Monitor, da sonst die integrierte Zeituhr ungenau wird. Wenn Sie die Batterien versehentlich doch länger als zwei Stunden aus dem Monitor genommen haben, sollten Sie bis zur nächsten Menstruation auf Geschlechtsverkehr verzichten. Es ist wichtig, dass Sie sofort die neuen Batterien einsetzen, nachdem Sie die leeren Batterien entfernt haben. Ersetzen Sie jeweils den kompletten Satz Batterien.

Rückstellung Ihres Monitors



Wenn Sie länger als einen Monatszyklus PERSONA nicht angewendet haben, müssen Sie Ihren Monitor zurückstellen. Bitte lesen Sie unbedingt zuerst die folgenden Hinweise vollständig durch.

- Die Rückstellung des Monitors löscht Ihre gesamten persönlichen Informationen, die der Monitor gespeichert hat.

Rückstell-Anleitung

- 1 Öffnen Sie Ihren Monitor und warten Sie ab, bis er sich wieder ausschaltet (30 Sekunden).
- 2 Nachdem sich Ihr Monitor ausgeschaltet hat, legen Sie das PERSONA-Teststäbchen in den Leseschlitz ein. Kontrollieren Sie sorgfältig, dass das Teststäbchen richtig eingelegt wurde. Sie haben bei der Rückstellung keine Kontrolle durch das blinkende gelbe Testlicht.
- 3 Drücken Sie den 'M'-Knopf und halten Sie ihn gedrückt, während Sie die Schritte 4, 5 und 6 durchführen.
- 4 Drücken Sie zusätzlich auf die Öffnungstaste, um Ihren Monitor einzuschalten.



- 5 Es wird das 3  Symbol angezeigt*. Halten Sie den 'M'-Knopf weiter gedrückt und belassen Sie das Teststäbchen im Leseschlitz.
- 6 Nach ungefähr 15 Sekunden leuchten alle drei Lichter kurz auf und alle Symbole werden auf dem Display angezeigt. Danach wird wieder das 3  Symbol angezeigt. Sie können jetzt den 'M'-Knopf loslassen und das Teststäbchen herausnehmen.
- 7 Auf Ihrem Display wird jetzt folgendes Symbol angezeigt: „— m“. Ihr PERSONA-Monitor ist jetzt zurückgestellt und für die erneute Anwendung bereit.



* Falls das Buchsymbol nicht angezeigt wird, wurde das Teststäbchen nicht richtig eingelegt.

- Die Rückstellung ist unwiderruflich. Die gelöschten Informationen können nicht wieder installiert werden.
- PERSONA wird Sie nach einer Rückstellung des Monitors als „neue Anwenderin“ ansehen, das heißt, im ersten Anwendungszyklus nach der Rückstellung wird PERSONA 16 Urintests anfordern. Deshalb ist es notwendig, dass Sie sich 2 Packungen mit je acht Teststäbchen mit derselben Chargen-Bezeichnung (Ch-B.) oder eine 3 Monats-Packung besorgen, bevor Sie die erneute Anwendung beginnen.
- Als „neue Anwenderin“ bekommen Sie wahrscheinlich mehr „rote“ Tage angezeigt, bis PERSONA mehr Information über Ihren Monatszyklus zusammengetragen hat.
- Zur Rückstellung Ihres Monitors benötigen Sie ein PERSONA-Teststäbchen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, dass Sie ausnahmsweise ein Teststäbchen aus Ihrem letzten Anwendungszyklus aufbewahren, um es zur Rückstellung zu verwenden.
- Bevor Sie mit der Rückstellung beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob sich funktionstüchtige Batterien in Ihrem Monitor befinden.
- Wenn Sie es noch nicht getan haben, prüfen Sie ob PERSONA für Sie geeignet ist (siehe Seite 2 und 3).